

# ACTIVE

## *Erection System*<sup>NT®</sup>

---

Medisch hulpmiddel om een  
erectie te verkrijgen

Gebruiksaanwijzing

Nederlands



**MED***intim*

*your natural joy*



## Oorzaken voor erectiestoornissen

De belangrijkste oorzaken van erectiestoornissen en impotentie zijn:

- Diabetes
- Hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk)
- Vaataandoeningen
- Bijwerkingen van medicijnen
- Prostaatklaften en/of prostaatoperatie
- Ouderdom
- Hormonale of psychische stoornissen
- Overmatig alcoholgebruik
- Roken

## Product informatie

Het **ACTIVE *Erection System*<sup>NT</sup>**® is een medisch hulpmiddel om een erectie op te wekken. De vacuümpomp zorgt voor een onderdruk in de cilinder rondom de penis. Hierdoor vullen de zwellichamen van de penis zich met bloed en ontstaat een kunstmatige erectie. Vervolgens wordt één van de drukringen tot aan de basis van de penis geschoven.

Deze verhindert bij het verwijderen van de cilinder, dat het bloed terugstroomt en houdt daardoor de erectie in stand. Met de aldus verkregen erectie is normaal geslachtsverkeer weer mogelijk.

Na de geslachtsdaad dient de drukring direct verwijderd te worden. Het systeem en alle onderdelen wordt geleverd in een degelijke opbergtas.

**Het ACTIVE *Erection System*<sup>NT</sup>® bestaat uit de volgende onderdelen:**

- conus, taps toelopend hulpstuk van kunststof
- geleidering 1
- geleidering 2
- cilinder van transparant kunststof (perspex)
- elektrisch pompje, incl. 3 batterijen AAA 1,5 Volt
- 4 drukringen in de maten 10, 12.5, 15 en 20 mm
- glijmiddel (SYLK of KLICK)
- gebruiksaanwijzing
- opbergtas

## **Toepassing**

Het **ACTIVE *Erection System*<sup>NT</sup>®** is eenvoudig in gebruik. Het verdient niettemin aanbeveling om eerst een keer in alle rust, het systeem uit te proberen als u alleen bent. Wanneer later, u en uw partner vertrouwd zijn geraakt met het **ACTIVE *Erection System*<sup>NT</sup>®**, is de kans groot dat u samen weer normaal gemeenschap kunt hebben, ongeacht de oorzaak van uw erectieklachten.

**Om een optimale erectie te kunnen behouden, is het van belang dat u de juiste maat drukring uitkiest.**

Met een te grote ring blijft de penis onvoldoende stijf. Nadat de cilinder is verwijderd, duurt de erectie dan tekort of verdwijnt helemaal. Kiest u een te kleine maat drukring, dan kan dat pijnlijk zijn. In dat geval dient u de drukring van de penis af te schuiven en een grotere ring te proberen, zodra de penis opnieuw stijf is gemaakt met de pomp.

De drukringen zijn aan de binnenzijde afgevlakt, om met een breder oppervlak druk uit te oefenen op de bloedvaten van de penis, zonder echter pijn te veroorzaken.

**Geleidehuls 1** dient voor het over de penis schuiven van de drukringen 1 (10 mm) of 2 (12.5 mm).

**Geleidehuls 2** dient voor het over de penis schuiven van de drukringen 3 (15 mm) of 4 (20 mm).

**De conus** is slechts bedoeld als hulpstuk om de drukringen op één of beide geleidehulzen te schuiven.

## Gebruik van het elektrisch pompje

### Plaatsen van de batterijen

Neem het pompje vast in de ene hand, aan de blauwe rubberen rand. Draai nu met de andere hand de grijze plastic top linksom, zodat deze los komt van de bodem. Duw vervolgens het plaatje omhoog, waarop het serienummer en de CE-code staan afgedrukt. Plaats de 3 meegeleverde AAA batterijen. Let er daarbij op dat u ze in de juiste positie plaatst (plus- en minpool) zoals aangegeven met de + en – symbooltjes. Klik het plastic plaatje weer terug over de batterijen. Plaats de grijze plastic top terug door deze rechtsom de draaien totdat u een klik hoort (let op : zorg dat de zijde met de blauwe rubberen symbolen geplaatst wordt aan de zijde waar zich de 2 zwarte, puntvormige schakelaartjes bevinden).

### Vacuüm regeling met de + en – knoppen

Op de pomp bevinden zich 2 blauwe drukknoppen, aangeduid met een + en een – symbool.


Door op de + knop te drukken, schakelt u het pompje in en gaat er een klein lampje in de pomp branden. Door herhaald op de + knop te drukken, versterkt u de zuigkracht van het pompje. Door op de – knop te drukken, wordt de zuigkracht verminderd. Door de – knop enkele tellen ingedrukt te houden, wordt het apparaat geheel uitgeschakeld.

## Ontluchtungsknop


Boven de + en - knoppen bevindt zich een derde drukknop met een grijs rondje ● als symbool. Dit is de ontluchtungsknop. Wanneer u deze knop indrukt, wordt lucht in de cilinder gelaten, waardoor het vacuüm vermindert of geheel kan worden opgeheven.

## Zo wordt het ACTIVE *Erection System*<sup>NT</sup>® in gebruik genomen


1) Leg vooraf alle onderdelen van het **ACTIVE *Erection System*<sup>NT</sup>** klaar.

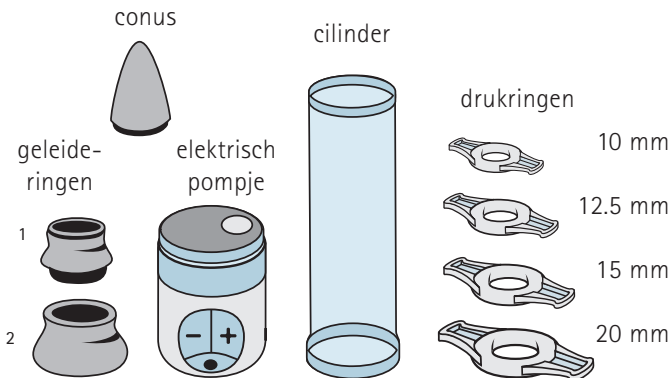


2) Plaats het elektrisch pompje op de cilinder.

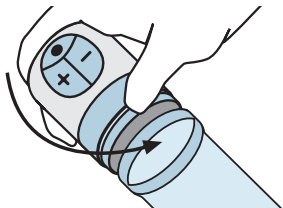


3) Plaats de conus op het andere uiteinde van de cilinder.

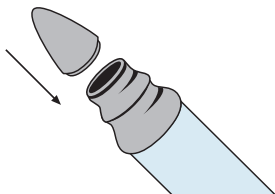


4) Begin met de grootste maat drukring (20 mm) en schuif deze met behulp van de conus op het uiteinde van de cilinder. Verwijder de conus.

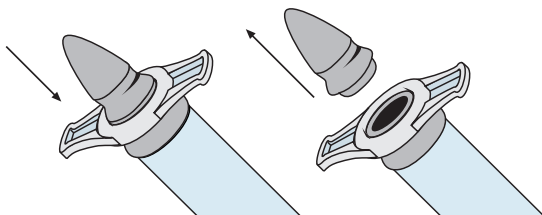


- 5) Breng wat van het bijgeleverde glijmiddel aan op de basis van penis. Verwijder zonodig wat schaamhaar. Op deze wijze wordt voorkomen dat lucht weglekt bij het vacuüm-pompen.

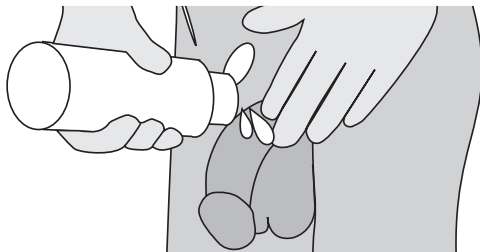


- 6) Schuif de cilinder (dus met de drukring aan het open uiteinde) over de nog slappe penis en druk de cilinder stevig tegen het lichaam. Begin nu te pompen om een onderdruk in de cilinder tot stand te brengen. Druk daartoe de op de + knop. Door de transparante cilinder kunt u nu zien, dat de penis langzaam stijf wordt. Bij een te sterke onderdruk of pijn, kunt u met ontluchtingsknop ● wat lucht in de cilinder laten lopen.

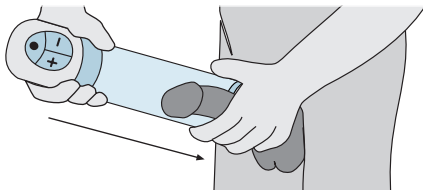


- 7) Zodra de penis voldoende stijf is, schuift u de drukring van de cilinder af en plaatst deze zo ver mogelijk op de basis van de penis. Daarna verwijdert u de cilinder.

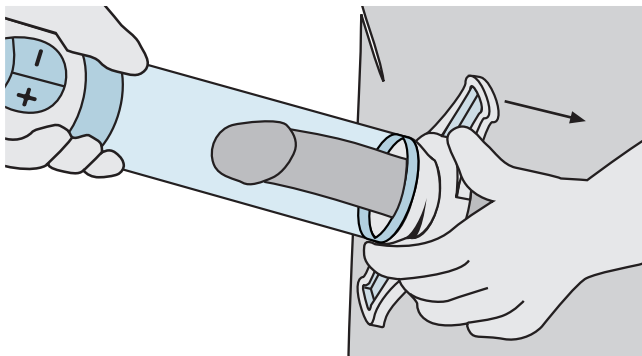

- 8) De aldus gevormde en in stand gehouden erectie is voldoende om geslachtsverkeer te hebben op de manier die u gewend bent.

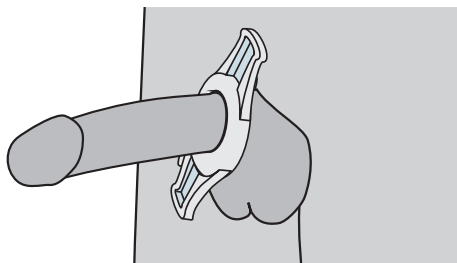

- 9) Verwijder de drukring direct nadat u bent klaargekomen.

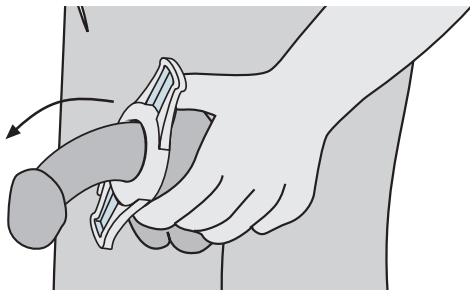

## Belangrijke aanwijzingen

- De drukring mag niet langer dan 30 minuten worden gebruikt.
- Val **niet** in slaap met de drukring nog om de penis. Langdurige onderbreking van de doorbloeding van de penis kan schadelijk zijn.
- Bij het orgasme heeft u nauwelijks een zichtbare zaadlossing, aangezien de drukring het sperma tegenhoudt. Na verwijdering van de drukring vloeit het sperma alsnog naar buiten. Dit is niet schadelijk.
- Maak de ringen voor gebruik optimaal elastisch, door ze kort in warm water te dompelen. Dit verlengt de gebruiksduur van de ringen.

- De drukringen hebben een beperkte levensduur en moeten van tijd tot tijd worden vernieuwd.
- **Breng de drukringen niet in contact met glijmiddelen op oliebasis.**
- Voorkom dat de drukringen in contact komen met de damp van oplosmiddelen zoals ether.
- Als het bijgeleverde glijmiddel is verbruikt, kunt u dit nabestellen bij Kessel Nederland. Of vraag bij uw drogist of apotheek om een glijmiddel op waterbasis.
- Verwijder de batterijen wanneer u het systeem langere tijd niet gebruikt.
- Indien u het **ACTIVE *Erection System*<sup>NT</sup>** regelmatig gebruikt, kies dan voor oplaadbare batterijen.

## Bijwerkingen

Nadat te snel of te intensief is gepompt, kunnen soms kleine bloeduitstortinkjes zichtbaar worden op de wand van de penis of de eikel. Deze zijn als regel van voorbijgaande aard. Raadpleeg een arts, indien deze verschijnselen niet binnen enkele dagen verdwenen zijn.

## Reiniging

De onderdelen van het **ACTIVE *Erection System*<sup>MT</sup>** kunnen, met uitzondering van het elektrisch pompje, eenvoudig met warm water en milde zeep worden gereinigd.

Het pompje kan aan de buitenzijde met een vochtig doekje gereinigd worden. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. Laat na reiniging de onderdelen goed drogen en berg ze op in de bijgeleverde tas.


## Verwijdering

Alle onderdelen, behalve het elektrisch pompje en de batterijen, kunnen met het huisvuil worden weggegooid. Het pompje dient als speciaal afval te worden afgegeven. Gooi de lege batterijen weg op een manier, die het milieu zo min mogelijk schaadt.

## Garantie

Voor alle onderdelen van het systeem, behalve de drukringen en het glijmiddel, geldt een garantietermijn van 2 jaar na datum van aankoop. Deze garantie vervalt bij onjuist gebruik, zoals laten vallen of vochtinwerking. Wij adviseren het apparaat om de 2-3 jaar voor technische controle naar ons toe te sturen.

## Materialen

- Conus: ABS kunststof
- Geleiders 1 en 2: ABS kunststof
- Drukringen: biologisch afbreekbaar polymeer
- DC batterijen AAA 1,5 Volt
- Cilinder: perspex
- 

Alle onderdelen alsmede de glijmiddelen SYLK of KLICK kunnen worden nabesteld.

**CE** 483 medisch product klasse IIa

**Fabrikant en verkoop**

KESSEL Marketing & Vertriebs GmbH

Kelsterbacher Str. 28

D-64546 Mörfelden-Walldorf/Germany

Tel. +49 6105 - 20 37 20

Fax +49 6105 - 45 59 01

service@kessel-marketing.de

