

READY

Erection System[®]

Een systeem voor het behouden van de erectie als deze te kort duurt

Gebruiksaanwijzing

Nederlands



MED*intim*

your natural joy

Oorzaken van erectiestoornissen

De belangrijkste oorzaken van erectiestoornissen zijn:

- Diabetes
- Hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk)
- Vaataandoeningen
- Bijwerkingen van medicijnen
- Prostaatklasten en/of prostaatoperatie
- Ouderdom
- Hormonale of psychische stoornissen
- Overmatig alcoholgebruik
- Roken

Productinformatie

Het **READY *Erection System***[®] is een medisch hulpmiddel, bestemd voor mannen die nog in staat zijn om een natuurlijke erectie te krijgen, maar vervolgens last hebben van een te kort durende erectie. Met behulp van het **READY *Erection System***[®] wordt een speciale drukring aangebracht aan de basis van de penis, zodra deze van nature stijf is geworden. De drukring houdt de terugstroom van bloed uit de penis tegen, waardoor de eigen erectie behouden blijft. Op deze manier wordt verhinderd dat de penis voortijdig slap wordt. Met de aldus verkregen erectie is normaal en bevredigend geslachtsverkeer mogelijk. Na de geslachtsdaad moet de drukring weer worden verwijderd.

Het **READY *Erection System***[®] bestaat uit de volgende onderdelen:

- conus
- geleidering 1
- geleidering 2
- 5 verschillende drukringen met de maten 10, 12,5, 15, 20 en 22 mm
- glijmiddel op waterbasis (SYLK of KLICK)
- gebruiksaanwijzing
- lederen opbergtas

Toepassing

Het **READY *Erection System***[®] is eenvoudig in gebruik.

Het verdient niettemin aanbeveling om eerst een keer in alle rust, het systeem uit te proberen als u alleen bent. Wanneer later, u en uw partner vertrouwd zijn geraakt met het **READY *Erection System***[®], is de kans groot dat u samen weer normaal gemeenschap kunt hebben, ongeacht de oorzaak van uw erectieklachten.

Om een optimale erectie te kunnen behouden, is het van belang dat u de juiste maat drukring uitkiest. Met een te grote ring, blijft de penis onvoldoende stijf. Nadat de cilinder is verwijderd, duurt de erectie dan tekort of verdwijnt helemaal. Kiest u een te kleine maat drukring, dan

kan dat pijnlijk zijn. In dat geval dient u de drukring van de penis af te schuiven en een grotere ring te proberen, zodra de penis opnieuw stijf is geworden.

De drukringen zijn aan de binnenzijde afgevlakt, om met een breder oppervlak druk uit te oefenen op de bloedvaten van de penis, zonder echter pijn te veroorzaken.


Geleidehuls 1 dient voor het over de penis schuiven van de drukringen 1 (10 mm) of 2 (12,5 mm).

Geleidehuls 2 dient voor het over de penis schuiven van de drukringen 3 (15 mm), 4 (20 mm) of 5 (22mm).

De conus is slechts bedoeld als hulpstuk om de drukring over degeleidingen te schuiven.

Zo wordt het **READY Erection System**[®] in gebruik genomen

- 1) Leg vooraf alle onderdelen van het **READY Erection System**[®] klaar.

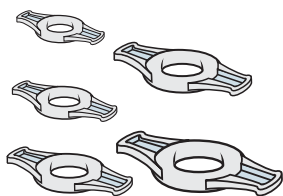

drukeringen 10 mm, 12.5 mm,
15 mm, 20 mm, 22 mm

conus




1.




2.

geleidingen


-
- 2) Verbind de conus en geleiding 1 met elkaar, als u gekozen heeft voor gebruik van een kleine drukring, maat 10 of 12,5mm.

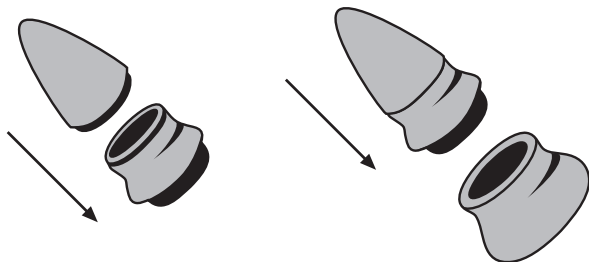


3) Plaats ook geleidering 2, indien gebruik gemaakt wordt van de drukring met maat 15, 20 of 22mm.

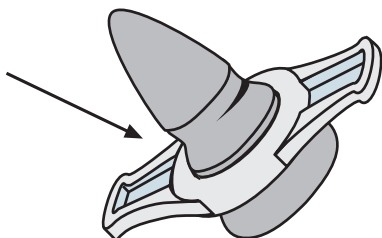


4) Verwijder de conus. Het systeem is nu klaar voor gebruik.

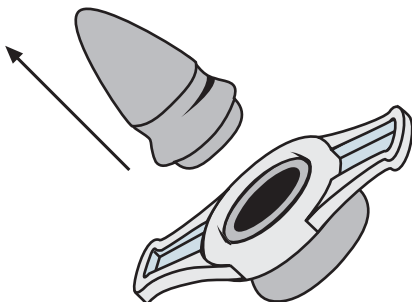


- 5) Schuif de geleidering met daarop de drukring, over de penis zodra deze stijf is.

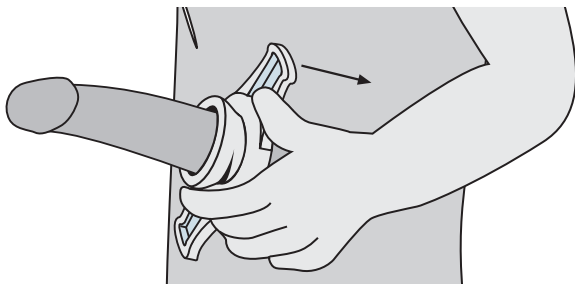

-
- 6) Duw de drukring af van de geleidering en plaats de drukring zo ver mogelijk aan de basis van de penis. Hierna verwijdert u de geleidering.

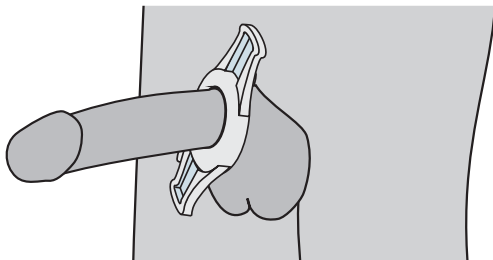

- 7) De drukring zorgt er nu voor dat de eigen erectie voor langere tijd behouden blijft, zodat normale gemeenschap mogelijk is.

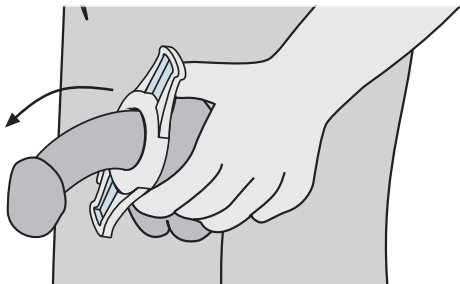

-
- 8) Verwijder de drukring nadat u bent klaargekomen. Dit gaat het snelst door de ring met beide vleugels uit te rekken.

Belangrijke aanwijzingen

- Zorg ervoor dat de drukring niet langer dan 30 minuten de penis afklemt.
- Val **niet** in slaap met de drukring nog om de penis. Langdurige onderbreking van de doorbloeding van de penis kan schadelijk zijn.
- Bij het orgasme heeft u nauwelijks een zichtbare zaadlozing, aangezien de drukring het sperma tegenhoudt. Na verwijde-

ring van de drukring vloeit het sperma alsnog naar buiten. Dit is niet schadelijk.

- De drukringen dienen bij voorkeur koel (bijvoorbeeld in de koelkast) te worden bewaard. Maak de ringen voor gebruik weer optimaal elastisch, door ze kort in warm water te dompelen. Deze wijze van opbergen verlengt de gebruiksduur van de ringen, maar noodzakelijk is het niet
- De drukringen hebben een beperkte levensduur en moeten van tijd tot tijd worden vernieuwd.
- **Breng de drukringen niet in contact met glijmiddelen op oliebasis.**
- Als het bijgeleverde glijmiddel is verbruikt, kunt u bij drogist of apotheek terecht voor aanvulling. Vraag dan om een glijmiddel op waterbasis.
- **Wanneer een eigen erectie niet meer mogelijk is, kunt u overwegen om met speciale penispomp, een kunstmatige erectie op te wekken, zodat normale gemeenschap weer mogelijk is. Voorbeelden zijn het *MANUAL Erection System*[®] (met handpomp) en het *ACTIVE Erection System*[®] (met elektrisch pompje).**

Bijwerkingen

Na het aanbrengen van de drukring, kan de penis blauw aanlopen en de bloedvaten van de penishuid kunnen enigszins opzwellen. Hieraan is geen risico verbonden.

Reiniging

Het **READY *Erection System***[®] kan eenvoudig met warm water en een milde zeepoplossing worden gereinigd. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. Laat na reiniging de onderdelen goed drogen en berg ze op in de bijgeleverde lederen tas.

Verwijdering

Alle onderdelen kunnen met het huisvuil worden weggegooid.

Garantie

Voor alle onderdelen geldt de wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Deze garantie vervalt bij onjuist gebruik, zoals bijvoorbeeld laten vallen.

Materialen

- Conus: ABS kunststof
- Geleiding 1 en 2: ABS kunststof
- Drukringen: biologisch afbreekbaar polymeer
- Glijmiddel: wateroplosbaar

Alle onderdelen en de glijmiddelen SYLK of KLICK kunnen worden nabesteld. Zie bijgevoegde bestelkaart.

CE Medisch product klasse I

Fabrikant en verkoop

KESSEL Marketing & Vertriebs GmbH

Kelsterbacher Str. 28

D-64546 Mörfelden-Walldorf/Germany

Tel. +49 6105 - 20 37 20

Fax +49 6105 - 45 59 01

service@kessel-marketing.de

www.medintim.de